



# NOTICE

---


## Têtes d'application (TABs) pour l'équipement CelluRK

---

**RK INNOV SAS** 25 rue des écoles, 95500 Le Thillay (France)

+33 (0)1 34 38 80 18 [contact@rkinnov.fr](mailto:contact@rkinnov.fr)

SIRET 834 288 482 RCS Pontoise GLN 3770018797014 SRN FR-MF-000028533

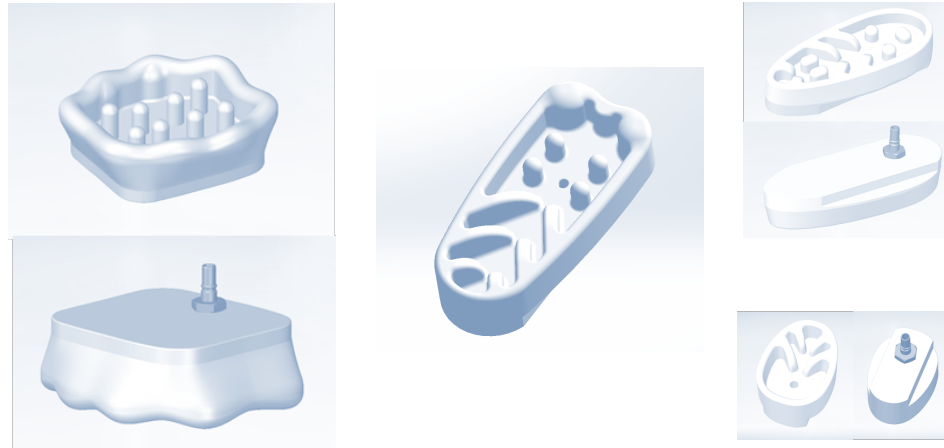

## 1. INTRODUCTION

Dans l'idée de développer des équipements permettant au praticien de travailler efficacement sans trop de pénibilité et avec une efficacité accrue, RKINNOV a développé un équipement de massage CelluRK permettant de travailler sans fatigue à la fois automatiquement (mains libres) et manuellement.

Il est équipé de flexibles et de têtes d'application dénommées TABs (têtes d'Application pour « Bien-être »). Celles-ci sont les parties appliquées sur le corps, qui sont raccordées aux flexibles eux-mêmes raccordés à l'équipement CelluRK.

La présente notice est destinée à présenter les TABs. Elle contient les instructions qui doivent être suivies pour garantir une bonne utilisation avec un fonctionnement correct et maintien des conditions d'hygiène et de sécurité. Elle complète le manuel d'utilisation de l'équipement CelluRK référencé « CRK Manuel ». Les deux documents doivent être impérativement lus avant la première utilisation, notamment les avertissements et limites d'utilisation donnés ci-après.

La première édition de ce document est Mai 2021, la date de révision est indiquée dans les références du document en haut à droite de la page (date écrite à l'envers).

## Sommaire

1. Introduction .....	2
2. Signification des symboles et étiquettes .....	4
3. Précautions et avertissements.....	4
4. Mode d'emploi.....	5
5. Nettoyage et désinfection .....	6
6. Stockage des TABs propres et sèches .....	6
7. Entretien .....	6
Annexe - Information supplémentaire .....	7

## Destination

L'équipement CelluRK est conçu pour l'application des programmes de PCP-Ventouse pour des massages dans le cadre de la pratique sportive, l'esthétique, le drainage lymphatique et autres usages visant à améliorer le bien-être.

Comme toute autre technique de massage, la PCP-Ventouse mobilise les différentes couches cutanées, ce qui favorise la circulation sanguine et le drainage veino-lymphatique. Elle permet de relâcher les tensions musculaires et d'améliorer le bien-être. Il en résulte une relaxation générale, une meilleure récupération musculaire après un exercice physique.

L'équipement CelluRK est destiné à l'usage de professionnels du bien-être après une formation spécifique par RK INNOV.

## Description





Les têtes d'application sont fournies dans une valise de rangement qui comprend :

- jusqu'à 9 TABs (4 TABR, 2 TABL, 2 TABJP, 1 TABP)
- la présente notice d'utilisation.

Les têtes de tailles et formes ergonomiques différentes ont une conception brevetée. Elles permettent de s'appliquer sur différents segments anatomiques du corps et sont interchangeables. Elles sont mentionnées dans le tableau ci-après.

## Caractéristiques techniques

- Matériau rigide
- Différentes formes et dimensions (voir tableau)
- Fabriqué en France
- Garantie 2 ans
- Durée de vie 5 ans

Référence		Exemples de sites d'utilisation
TABR		Dos, épaules, ventre, fessier, cuisses, ...
TABL		Trapèzes, dos, psoas, cuisses, moyen fessier, Tenseur de Fascia Lata (TFL), adducteurs, mollets, bras, avant-bras...
TABJP		Avant-bras, tibia, trapèzes ...
TABP		Nuque, avant-bras, poignets, paumes de mains, plantes des pieds, point localisé comme tendon d'Achille, ...

## Performances d'utilisation

- Manipulation facile
- Connexions rapides et fiables
- Tailles et formes différentes adaptées aux zones à travailler
- Présence d'ergots pour remplacer les doigts du praticien et permettant d'appliquer une pression continue profonde
- Application sur de grandes surfaces corporelles : possibilité de travailler sur tout le corps aussi bien la face antérieure que la face postérieure
- Réduction et élimination des tensions musculaires
- Soulagement du praticien dans ses actes quotidiens répétitifs et travail sans pénibilité avec plus d'efficacité
- Formes ergonomiques respectant les zones anatomiques
- Ventouses sèches et non-invasives (sans rupture de la barrière cutanée)
- Lavables avec une bonne aptitude à la décontamination (hygiène)

## 2. SIGNIFICATION DES SYMBOLES ET ETIQUETTES

Les têtes d'application TABs sont des accessoires de l'équipement CelluRK qui est un équipement de massage considéré comme un appareil électrodomestique mis sur le marché avec le marquage CE. Le marquage figure sur le dessus de chaque TAB, le marquage complet est rappelé sur la valise de stockage des TABs. Les symboles suivants y sont visibles :



Référence catalogue du fabricant



Numéro de série du fabricant et



Accessoire d'équipement mis sur le marché conformément aux exigences réglementaires



Obligation de lire les instructions avant la 1ère utilisation

## 3. PRECAUTIONS D'EMPLOI ET AVERTISSEMENTS

Suivre les recommandations de la formation et lire attentivement toutes les informations relatives aux précautions et avertissements avant d'utiliser l'équipement. L'utilisateur responsable du CelluRK est responsable des TABs et de leur utilisation conformément aux instructions. Le non-respect de celles-ci pourrait entraîner des dommages tissulaires, blessures ou douleurs pour le client. RK INNOV ne sera pas responsable en cas d'usage inapproprié des TABs.

### Ne pas utiliser ou stocker les TABs dans les environnements suivants :

- A proximité de toute source de poussières, polluants biologiques et/ou chimiques notamment les aérosols (sprays) —de l'humidité...

### Ne pas utiliser les TABs dans les cas suivants :

- Sans la formation préliminaire de PCPVac par RK INNOV
- Avec d'autres équipement (l'usage des TABs est exclusivement réservé à l'équipement CelluRK)
- En cas de doute sur l'état de surface des TABs

- Personne en cours de traitement médical sans approbation de son médecin traitant
- En cas de doute ou de traitement médical en cours, de douleur ou de picotements lors de la séance, arrêter immédiatement et en chercher les causes, demander l'avis du médecin traitant

### Ne pas appliquer les TABs sur :

- Imperfections de la peau, lésions (blessure, éruption cutanée, varices, zone à nœud vasculaire, herpès cutané, verrues, grains de beauté suspects...)
- Le visage, la gorge, nombril, plis (abdomen, fesses), poitrine, zones de nœuds vasculaires

### Contre-indications

- Pathologies de l'appareil locomoteur, varices profondes, risques thrombo-emboliques ou 2 mois après une chirurgie des veines, pathologies infectieuses ou cancéreuses, traitement anticoagulant

### Utiliser avec prudence pour les personnes :

- Âgées, fragiles, femmes enceintes et enfants

### Utiliser avec prudence et approbation du médecin traitant en cas de personnes :

- Enfants (seulement les programmes « soft » en mode pulsé, voir CRK Manuel)
- Femmes enceintes (pas de traitement sur les zones abdominale et lombaire)
- Personnes âgés et/ou fragiles (seulement les programmes « soft » en mode pulsé)
- Souffrant de pathologie vasculaire, notamment thrombo-emboliques et troubles de la coagulation ou traitement anticoagulant en cours après avis du médecin traitant
- Souffrant d'ostéoporose aiguë, fragilité ostéo-articulaire et autre maladie lourde neurodégénérative, auto-immune, ...
- Localement, au niveau de zones de nœuds vasculaires, varices, œdèmes ...

### Pour l'application des TABs, prendre les précautions suivantes :

- Appliquer sur une peau saine, propre et sèche

- En cas de desquamation cutanée (après exposition solaire par exemple), demander au patient de faire un gommage avant la séance (pour ne pas encrasser les filtres des flexibles)
- Demander au patient d'enlever les bijoux au niveau des zones à traiter, les cheveux doivent être attachés
- Utiliser seulement des TABs propres et sèches
- Utiliser les programmes « Soft » en mode pulsé pour la(les) première(s) séance(s), les enfants et personnes âgées et/ou fragiles
- Après chaque patient, nettoyer et désinfecter les TABs selon la procédure donnée au § 5
- Toujours garder les TABs dans un endroit propre et sec, protégées de la poussière et des contaminants.

#### 4. MODE D'EMPLOI

La manipulation technique est très simple mais lire complètement et attentivement le manuel de l'utilisateur de l'équipement CelluRK (CRK Manual) avant l'utilisation. L'usage détaillé de l'interface homme-machine (clavier de commande) et des boutons de commande des TABs est détaillé dans le support de formation du CelluRK (CRK Support formation).

Avant la 1ère utilisation des TABs et après chaque stockage dans la valise de rangement, nettoyer et désinfecter les TABs selon le § 5.

##### Préparer l'installation de la personne

- Préparer la table de massage, couvrir d'une housse (en dehors des périodes à risque de COVID pour lesquelles la table de travail doit être nettoyée et désinfectée après chaque personne, voir § 5), mettre un coussin adapté pour poser la tête et un coussin adapté pour poser sous les chevilles ou les genoux dans la position allongée
- Mettre un drap d'examen (usage unique)
- Laisser la personne s'installer (sur le ventre ou sur le dos selon la zone concernée) et placer des coussins selon les bonnes pratiques de massage
- Fournir les informations appropriées (voir informations supplémentaires en annexe).

##### Préparer l'application

- Allumer l'appareil CelluRK (voir CRK Manuel) et s'assurer que le potentiomètre de la ligne directe est sur zéro
- Pour tester la sensibilité de la personne en réglant le potentiomètre pour identifier le seuil de sensibilité, connecter la TAB au flexible de la ligne directe
- Evaluer le seuil de sensibilité en plaçant la TAB sur les parties du corps concernées et tester le niveau de sensibilité
- Sélectionner les programmes en respectant le seuil de sensibilité de la personne et commencer le programme (voir CRK Manuel)
- Connecter les TABs aux flexibles et pour chacune, vérifier la bonne connexion par traction
- Positionner les TABs, vérifier la bonne adhésion avec la pression minimale de maintien (voir CRK Manuel pour l'usage des boutons de contrôle)
- Appuyer sur OK pour lancer le programme (voir CRK Manuel)
- Appuyer sur le bouton supérieur (fonction « ON ») pour aspirer
- Si nécessaire, appuyer sur le bouton inférieur (fonction de retrait) pour bouger la TAB

##### Finir la séance

- Pour chaque TAB, appuyer sur le bouton inférieur (fonction de retrait) pour libérer la TAB (entrée d'air) et la retirer
- Déconnecter la TAB et la placer sur un plateau ou dans un bac prévu pour stocker les TABs à nettoyer
- Ranger les flexibles sur les crochets de fixation au niveau de la potence du CelluRK (see CRK Manuel)
- Demander à la personne de s'asseoir doucement (voir les informations supplémentaires en annexe)
- Guider la personne pour éviter qu'il ne se déplace vers l'équipement
- Nettoyer les coussins et la table à l'aide de la solution désinfectante (en spray) et bien sécher avant de préparer la table pour la personne suivante
- Après chaque personne, nettoyer et désinfecter les TABs selon la procédure donnée au § 5

- Toujours garder les TABs et la valise de rangement dans un endroit sec, propre et protégé de la poussière.

## 5. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

- Prévoir une station de lavage avec au minimum un bac pour les TABs utilisées et un bac pour les TABs nettoyées et désinfectées
- Produit désinfectant recommandé : solution SURFANIOS PREMIUM dilué à 0,25% dans de l'eau (25 ml de la solution à diluer dans 8 litres d'eau)
- Après chaque personne, mettre les TABs utilisées dans le bac prévu
- Si possible, laisser tremper 30 min
- Utiliser une brosse souple et appropriée avec des gants de protection.
- Bien rincer à l'eau claire
- Laisser sécher les TABs (sur la face) sur une surface propre absorbante
- Une fois sèches, les replacer sur le plateau du CelluRK pour une nouvelle utilisation

⚠ Attention : ne pas utiliser de solvants organiques.

## 6. STOCKAGE DES TABS PROPRES ET SECHES

Après le nettoyage, la désinfection et le séchage des TABs selon le § 5, les ranger dans un bac de rangement (propre et fermé).

En cas de stockage longue durée ou transport, utiliser la valise de rangement fournie par RK INNOV.

Dans tous les cas, stocker les TABs dans une pièce propre et sécurisée sous la responsabilité de l'utilisateur, loin de polluants et contaminants.

## 7. ENTRETIEN

### Contrôle de service

Faire un examen visuel quotidien pour vérifier :

- L'intégrité des têtes (bon état de surface, absence de rugosités), ...
- La propreté des extrémités des flexibles au niveau des raccords des TABs.

### Service après-vente

Pour tout éventuel problème d'utilisation, doute, difficulté ou suggestion d'amélioration, nous vous recommandons de relever le numéro de série de votre équipement et de contacter RK INNOV SAS : [contact@rkinnov.fr](mailto:contact@rkinnov.fr)

Dans le cas d'un retour des TABs, les nettoyer avec précaution selon le § 5.

### Garantie

Les TABs sont garanties 2 ans à partir de la date de livraison contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement, provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception. La garantie RKINNOV ne couvre pas les dommages causés à la suite d'une :

- Intervention sur l'équipement ayant conduit à une modification de conception ou du revêtement de surface
- Utilisation inappropriée ne respectant pas les instructions de la présente notice (défaut d'entretien, surutilisation, ...)
- Usure anormale
- Cas de force majeure (accident...)

Au titre de la garantie et sous réserve de la présentation d'une copie de la facture, RKINNOV réparera ou remplacera les têtes reconnues défectueuses. Cette garantie couvre les frais de main d'œuvre et d'expédition après réparation

### Mise aux déchets

Après le dernier usage des TABs, les nettoyer, désinfecter et sécher selon le § 5 et jeter conformément aux réglementations locales en vigueur.

## ANNEXE - INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

La relaxation musculaire et la position allongée causent une relaxation générale qui peut occasionner des vertiges à la fin de la séance. Pour éviter tout désagrément, il est recommandé de plier les jambes sur le côté, se relever lentement jusqu'à atteindre la position assise, rester assis environ 1 min avant de se lever.

La relaxation donne une sensation de légèreté qui peut aller jusqu'à une faiblesse musculaire. Des courbatures et une sensation de fatigue peuvent être ressenties après les premières séances. Il est recommandé d'éviter l'exercice physique pendant 24 h à 48 h après la séance et de suivre les recommandations spécifiques, de bien boire pour une meilleure élimination des toxines.

Comme toutes techniques de mobilisation cutanée, la séance entraîne un effet de drainage. Il est recommandé de bien boire après les séances pour favoriser et compenser l'élimination urinaire.

L'effet de succion peut entraîner des marques sur la peau qui peuvent durer quelques jours sans aucun effet secondaire mais demandant d'éviter l'exposition au soleil dans les jours suivants.